


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

El sistema de batería de respaldo permite que el producto Guardian Alert 911 continúe funcionando en caso de corte del servicio eléctrico. Este producto es un accesorio del producto Guardian Alert 911.

El sistema viene de fábrica con 6 pilas AA de NiMH (1500mAh).

Instalación:

1. Coloque las 6 pilas que vienen con el producto dentro del módulo de Batería de respaldo. Para hacerlo, deslice la tapa azul hacia delante hasta que quede liberada la tapa de las pilas. Coloque las 6 baterías con sus terminales positivas apuntando hacia delante. Coloque nuevamente la tapa azul en la unidad.
2. Desenchufe el adaptador eléctrico de 12 voltios que normalmente está ubicado en la parte posterior de la unidad base del Guardian Alert 911 - y coloque el Sistema de batería de respaldo entre medio. En otras palabras - enchufe el adaptador eléctrico de 12 voltios en el Sistema de batería de respaldo - y enchufe el cable del Sistema de batería de respaldo en la parte posterior de la estación base. Esta operación aparece graficada en el diagrama que sigue a continuación.
3. Enchufe el adaptador eléctrico de 12 voltios en un tomacorriente. Asegúrese de elegir un tomacorriente que tenga alimentación continua - no uno que pueda ser desconectado con una llave de luz.

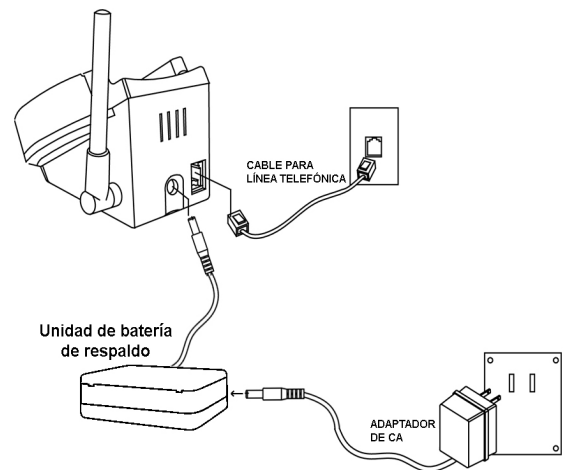

El indicador rojo en la unidad se encenderá durante la carga. Una vez que las baterías queden cargadas, la luz se apagará.

NOTA: Se recomienda cambiar las baterías cada dos o tres años. Cuando adquiera nuevas baterías - use pilas AA de NiMH de 1.500 mAh o de mayor capacidad. Con baterías de 1500 mAh - la unidad deberá proteger al sistema Guardian Alert 911 por 24 horas. Baterías de mayor amperaje por hora (por ej.: de 2500 mAh) podrán alimentar las unidades por casi el doble del tiempo.

PRECAUCIÓN: Controle periódicamente que su adaptador de 12 voltios esté firmemente enchufado en el tomacorrientes de la pared.

LogicMark

8625 Hampton Way; Fairfax Station, Virginia 22039

Tel: 703-934-7934

www.LogicMark.com